


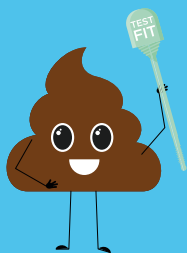

JE RÉALISE MON TEST EN 3 ÉTAPES




- 1** Je lis le mode d'emploi
> Volet 1 du kit
- 2** Je complète la fiche d'identification
> Volet 2 du kit
- 3** Je réalise le test et je le dépose dans
un laboratoire BIONEXT ou une boîte
aux lettres Post
> Volet 3 du kit



Mode d'emploi

INFOS CLÉS

Le test de dépistage du cancer colorectal permet de détecter un cancer à un stade très précoce. Il est recommandé tous les 2 ans, pour les femmes et les hommes de 45 à 74 ans, sans symptômes ni antécédents. **Détecté tôt, ce cancer se guérit dans 9 cas sur 10.**

-  **Fiable**
-  **Pris en charge à 100%**
-  **Simple et rapide**

Questions fréquentes

Quel est le délai d'utilisation du test ?
Jusqu'à la date d'expiration précisée sur le tube

J'ai perdu le tube ou le tube est abîmé. Que dois-je faire ?
Demandez un nouveau kit au laboratoire BIONEXT

Le prélèvement ne s'est pas passé correctement. Que dois-je faire ?
Prenez conseil auprès du laboratoire BIONEXT ou d'un pharmacien

Dois-je payer pour ce test ?
Non, il est pris en charge à 100% par la Direction de la santé

Puis-je déposer l'enveloppe bleue avec mon prélèvement dans un autre laboratoire ?
Non, vous devez le déposer dans une boîte aux lettres Post (l'enveloppe retour est pré-affranchie) ou dans le laboratoire BIONEXT de votre choix

Qui recevra mon résultat ?
Vous-même, le médecin que vous aurez désigné sur votre fiche d'identification, ainsi que le médecin du Centre de Coordination des programmes de dépistage des cancers

KIT DE DÉPISTAGE DU CANCER COLORECTAL

MODE D'EMPLOI

Ce kit est à usage personnel

**Avant son utilisation, conservez le kit à
une température comprise entre +2°C et +30°C**

Contact

Centre de coordination des programmes de dépistage des cancers,
Ministère de la Santé et de la Sécurité sociale, Direction de la santé
20, rue de Bitbourg - L-1273 Luxembourg-Hamm
Tél. : 247 755 50 - Fax : 247 95563 - colorectal@ms.etat.lu - www.sante.lu



D_COMM_188_001


MODE D'EMPLOI

Avant de commencer

Vérifiez la date d'expiration du test sur l'enveloppe ou sur le tube.

Si le test est périmé, demandez-en un nouveau en contactant le laboratoire BIONEXT au (+352) 27 321 888

J'AI RÉCEPTIONNÉ MON KIT DANS UN LABORATOIRE BIONEXT

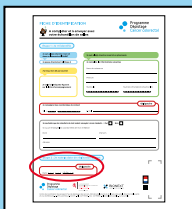


Sur la fiche d'identification, j'inscris la **date de réalisation du test**

J'AI REÇU MON KIT PAR COURRIER



Sur la fiche d'identification, je colle l'**étiquette nominative** et j'inscris la **date de réalisation du test**

JE SUIS ALLÉ(E) CHERCHER MON KIT EN PHARMACIE

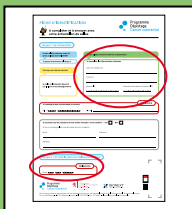

Sur la fiche d'identification, je complète les informations et j'inscris la **date de réalisation du test**


JE RÉALISE MON TEST




1 Urinez avant de commencer votre test.
Il ne faut pas que les selles soient en contact avec un liquide (urine, javel, ...)




2 Collez le papier brun de recueil des selles du volet 2, sur la lunette des toilettes à l'aide des autocollants. Appuyez doucement sur le papier pour faire un petit creux, **puis déposez-y les selles**

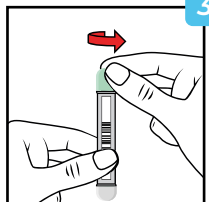


3 Ouvrez le tube en tournant le bouchon vert

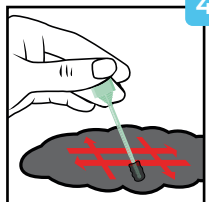

4 Grattez la surface des selles à plusieurs endroits à l'aide de la tige verte, puis jetez le papier brun dans les toilettes

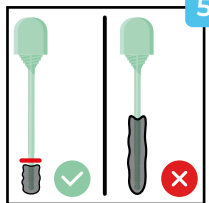

5 La partie striée de la tige (jusqu'à la marque rouge sur le dessin) doit être recouverte de selles

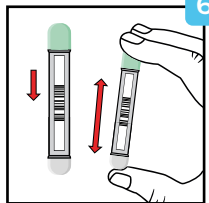


6 Refermez le tube et secouez-le énergiquement




7 Glissez ensuite le tube dans le sachet de protection (Safetybag) du volet 3



8 Fermez le Safetybag en retirant la languette blanche en haut du sachet

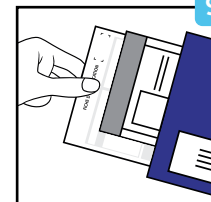

9 Insérez le Safetybag et la fiche d'identification datée et complétée dans l'enveloppe retour bleue pré-affranchie du volet 3

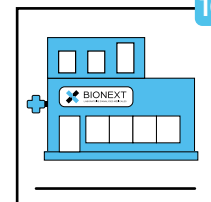

10 Retournez l'enveloppe bleue le jour même ou au plus tard le lendemain, soit :

- en la déposant directement dans un **laboratoire BIONEXT** du lundi au samedi

Liste des laboratoires : bionext.lu/centres

- en la déposant dans une **boîte aux lettres Post** (sauf la veille d'un week-end ou d'un jour férié)

Plus d'informations

- Laboratoire BIONEXT : (+352) 27 321 888
- Dans votre pharmacie
- Centre de coordination des programmes de dépistage des cancers www.sante.lu/colorectal ou par téléphone au (+352) 247-75550